

# TM-330 使用說明

產品：TM-330 手提式吸引器  
外觀尺寸：42L × 23W × 24H cm

電力：AC 110V  
淨重：約 16 kg



## A、 使用前檢查：

- 1、使用前請檢查各接頭處及瓶塞是否緊密。
- 2、將電源插入 110 V 插座，燈亮即可。
- 3、使用上若有任何疑問，請務必詢問專業技師以確保操作安全。

## B、 使用方法：

- 1、調整吸引調整器至需用之吸力度，即可抽吸，強弱由 0 至 76。
- 2、將延長管接頭插置玻璃瓶吸引孔，延長管另一端接上抽痰管，將抽痰管放置到要抽痰處抽吸。
- 3、抽吸時間如超過 15 分鐘，煩請休息 10~15 分鐘再使用，以保馬達壽命。
- 4、使用時如吸力不佳，可能是接頭及瓶塞不緊密或使用時間已久，馬達內機油已缺少，可一面開動吸引器，一面從機身上之吸引口灌入機油(機車用機油 40#)20~30c.c.，吸力就可增強。
- 5、如要使用腳踏開關，不用開啟手動開關  
請將腳踏開關插孔貼紙撕開即可(見右圖)。
- 6、若有任何問題或故障，請專業技術人員來修護。

**注意**  
如無腳踏開關使用者  
請勿撕毀

## C、 注意事項：

- 1、廢水瓶為二支，前面第一支如 5 分滿即應倒掉，第二支內不能有水，以免不小心水進入馬達內，而使馬達燒壞故障。
- 2、本產品使用壽命為 5 年。